



Automaatsed ravimidosatorid  
Careousel Advance  
Careousel GSM

# Ravimidosaator Careousel Advance / GSM

- Õige ravim õigel ajal
- Heli- ja valgussignaali ette nähtud kellaaegadel
- 28 ravimiannust kuni neljaks nädalaks
- Välistab üledoseerimise ja vale ravimi võtmise
- Lihtne kasutamine ja seadistamine
- Võimaldab kauem oma kodus elada
- Vähendab oluliselt hoolduskulusid
- Saadaval ka kaughallatav GSM-versioon

## Kasutamine

Ravimidosaatori kasutamine on ülimalt lihtne. Helisignaali kostudes tuleb seade tagurpidi keerata ja ravimiannus kätte või alusele kukutada. Seejärel meeldetuletus vaikib ja seade ootab järgmist tähtaega. Seadet kallutades on näha järgmise ravimi võtmise aeg.

## Seadistamine

Seadmel on rohkelt seadistamisvõimalusi, mis tehakse seadmel oleva kolme nupuga. Seadistamine on väga lihtne ja tehtav mõne minutiga. Võimalik on lukustada nii ravimite kui patareide sahtlit.

## Hooldamine

Seade on praktiliselt hooldusvaba. Kuni ravimite võtmisrežiim ei muutu, tuleb ravimisahtlit vaid uuesti ravimitega täita. Eemaldatav ravimisahtel on pestav. Neli AA-patareid kestavad aasta ja on hõlpsasti vahetatavad.

## Lisaseadmed

Saadaval ravimisahtlid, varuvõti ja ajarõngad. Liikumiskustega kasutajale on loodud seadme automaatne kallutamisalus. Seadme tootja, PharmaCell Roots on kvaliteetseid ravimidosaatoreid arendanud ja tootnud juba üle 20 aasta.

## Lisainfo ja tellimine

Meditech Estonia  
tel. 661 8181  
www.medi.ee  
info@medi.ee

